

# ANLEGEN DER MANU-CAST® ORGANIC

## FITTING THE MANU-CAST® ORGANIC



### SCHRITT 1

Öffnen Sie die Klettverschlüsse der MANU-CAST® ORGANIC.

### STEP 1

Open the Velcro fasteners of the MANU-CAST® ORGANIC.



### SCHRITT 2

Ziehen Sie die Orthese über die Hand.

### STEP 2

Pull the brace over the hand.



### SCHRITT 3

Der anatomisch vorgeformte Gitterrahmen liegt dabei an der Handinnenseite an.

### STEP 3

The anatomically pre-shaped lattice frame rests against the inside of the hand.



### SCHRITT 4

Der obere Steg muss zwischen dem Daumen und Zeigefinger liegen.

### STEP 4

The upper bar must lie between the thumb and the index finger.



### SCHRITT 5

Verschließen Sie die Klettverschlüsse mit dosiertem Zug. Der Handgelenkgurt wird dabei zirkulär um Handgelenk und Orthese gewickelt.

### STEP 5

Close the Velcro fasteners with measured tension. The wrist strap is wrapped circularly around the wrist and brace.



## SCHRITT 6

MANU-CAST® ORGANIC ist richtig angezogen, wenn der anatomisch vorgeformte Gitterrahmen formschlüssig an Handinnenfläche, Handgelenk und Unterarm anliegt.

## STEP 6

MANU-CAST® ORGANIC is properly tightened when the anatomically preshaped mesh frame fits snugly against the palm, wrist and forearm.



## SCHRITT 7

Zum Ablegen von MANU-CAST® ORGANIC öffnen Sie die zirkulären Klettbänder und ziehen die Orthese mit der anderen Hand ab.

## STEP 7

To remove MANU-CAST® ORGANIC, open the circular Velcro straps and pull the brace off with the other hand.

