

## Om produktet

Mundbind type IIR, beregnet til engangsbrug. Type IIR er den højeste standard og er det mundbind, der yder den bedste beskyttelse mod virus. "R" betegnelsen betyder, at der er tilføjet et ekstra lag af beskyttende materiale for særlig beskyttelse mod væskegennemtrængning. Medicinsk mundbind kaldes også kirurgisk mundbind, og det er disse, som anbefales i forbindelse med COVID-19.

## Korrekt påsætning af mundbind

1. Tag mundbindet ud og sørg for at fronten vender ud ad samt at den indsatte næseklemme er øverst på mundbindet.
2. Placér næseklemmen over næseryggen og fastgør elastikkerne bag ørerne.
3. Stræk nu mundbindet ud i opad og nedadgående retning, så det dækker over næseryg og hage - klem til sidst næseklemmen fast over næseryggen.



  
**CLINICAL**  
**INNOVATION**