



Godkendt CE-klasse EN 166 Genanvendeligt visir



SPECIFIKATION

Svensk-fremstillet genanvendeligt visir i henhold til CE-klasse EN166, hvor hvert visir er mærket med CE- klasse EN 166.

Permanent CE-godkendelse EN166 fra RISE, som er gyldig i 5 år indtil 2025.

Beregnet til at blive brugt som en omfattende ansigtsbeskyttelse mod drypinfektion, stænk osv.

Hovedsageligt udviklet til personale, der arbejder inden for og med

- Patientcentreret sundhedspleje
- Hjemmepleje

TEKNISK INFORMATION

Stabilt buet fuld visir. God størrelse, så selv dem, der bruger briller, kan bære visiret. Velcro-rem til justering for bedst pasform.

TEKNISK INFORMATION

Stabilt buet fuld visir. God størrelse, så selv dem, der bruger briller, kan bære visiret. Velcro-rem til justering for bedst pasform.

Dette dropvisir er designet som et genanvendeligt visir. Visiret er testet og evalueret * med RISE-metoden B2B FV01 1 S- EN 166 3S. Metoden er baseret på udvalgte krav i EN 166: 2001 til medicinsk beskyttelsesudstyr, personlig øjen- / ansigtsbeskyttelse.

* Testene udføres af RISE Research Institutes of Sweden AB.

Materiale:

Skærm: PET-G (0,45mm tykkelse)
Bånd: PA og PUR skum

Standard:
EN166:2001




NB 0402



5 745000 224029 >

Produceret af:
AB Nordisk B2B Partner,
Kungsgatan 48, SE-341 31
Ljungby, Sverige

**Beskyttelses visir fremstillet i Sverige og opfylder kravene i SS-EN166.
Beregnet til genanvendelig brug.**

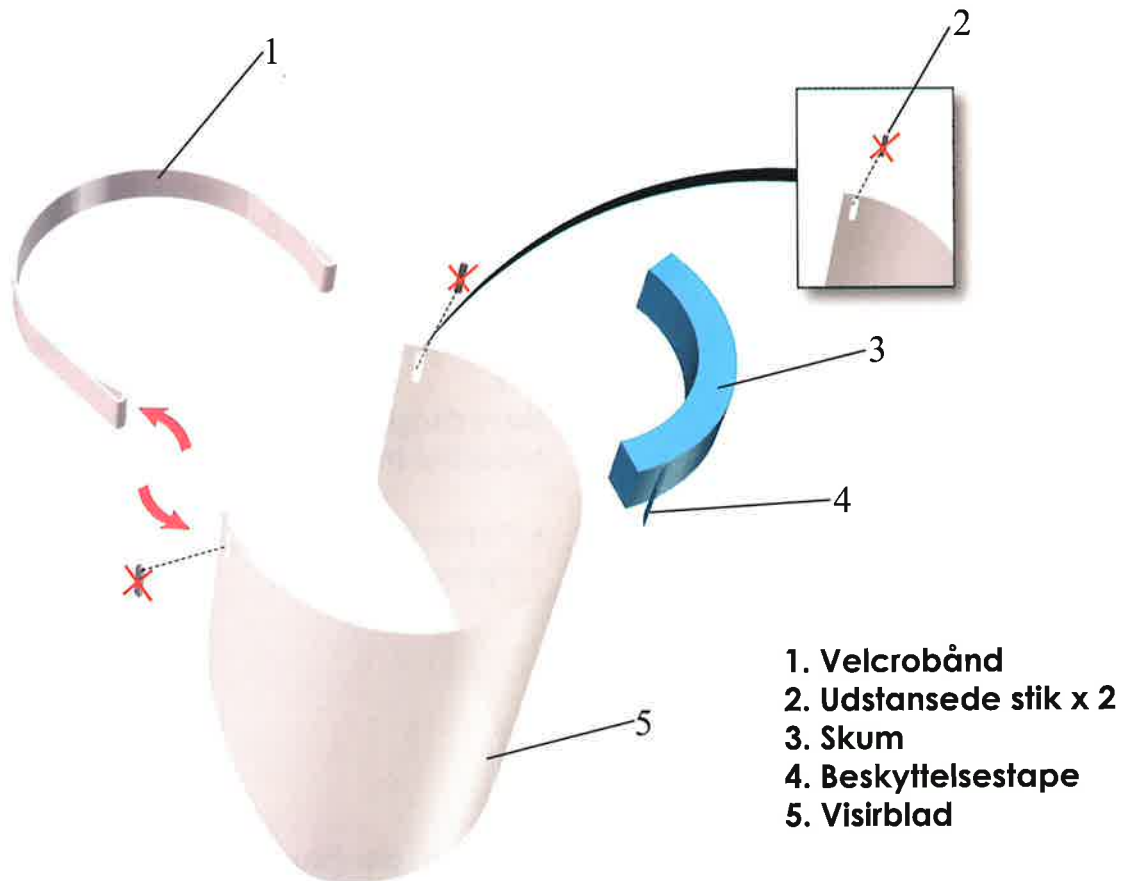

Beskrivelse af anvendelsen

Dette visir er let at montere og sætte på, justeret rundt om hovedet med velcro. Visiret anses for at kunne bruges sammen med briller og mundbeskyttere.

- Skub det udstansede stik ud, se billedet
- Fjern beskyttelsestapen på skummet og læg det i midten af visiret mellem de udstansede huller.
- Installer velcrobånd i soklen, se billede
- Sæt visiret på hovedet, og juster pasformen ved hjælp af velcrobåndene, se billede
- Justeringsmuligheden gør det muligt for brugeren at finde en behagelig pasform, der muliggør langvarig brug uden slid